2020



EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19

Correcta colocación y retiro de protector respiratorio

Hoy, mañana, siempre Prevenir es trabajo de todos los días







EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19


CORRECTA COLOCACIÓN Y RETIRO DE PROTECTOR RESPIRATORIO

Antes de iniciar el proceso de colocación de un protector respiratorio lávese las manos con agua y jabón, o con alcohol en gel o alcohol al 70%. Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos.

PASOS A SEGUIR



Retire el protector del envase.

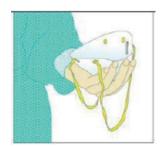

Coloque la máscara sobre la palma de la mano con los 5. Ajuste los costados de la nariz utilizando los dedos. elásticos libres. No tocar el interior del mismo.



Coloque la máscara sobre su cara con la pieza nasal 6. Ajuste correctamente la máscara. sobre su nariz. Pase el elástico superior sobre su cabeza.



4. Pase el elástico inferior y colóquelo debajo de la oreja y sobre el cuello.





Para verificar que el protector respiratorio se encuentre correctamente colocado posicione las manos como se indica en el punto 5, inhale y exhale suavemente, de ser necesario ajuste el pliegue de la nariz o los elásticos.

También se debe tener en cuenta:

- Los protectores pierden su efectividad si se utilizan con barba o bigote.
- Nunca manipular la máscara con las manos sucias.
- Los protectores deben ser retirados a través del elástico y sin tocar su frente.

EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19

CORRECTA COLOCACIÓN Y RETIRO DE PROTECTOR RESPIRATORIO

Hoy, mañana, siempre Prevenir es trabajo de todos los días

www.argentina.gob.ar/srt 0800-666-6778 ayuda@srt.gob.ar

Sarmiento 1962 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires



